


# HÜVELYI APPLIKÁTOR AZ OCTENISEPT® OLDAT ALKALMAZÁSÁHOZ

## ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

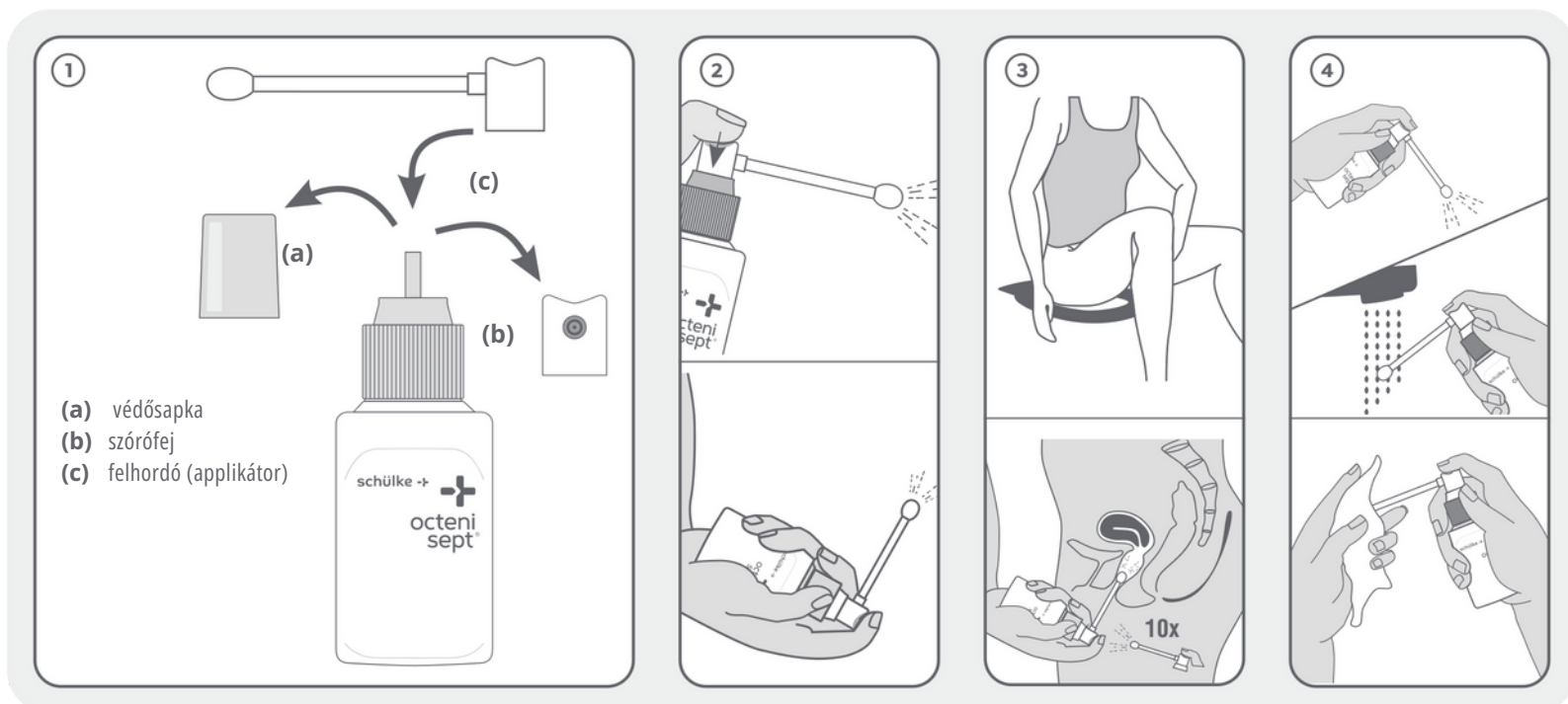

### HU Alkalmazási útmutató:

1. Az első használat előtt, kérjük, vegye ki a csomagolásból a (c) felhordót, és az (a) átlátszó védősapka levételét követően a (b) szórófejjel együtt helyezze azt az octenisept® palackra.
2. A helyes adagolás biztosítása érdekében az első alkalmazás előtt 8-szor nyomja meg a szórófejet.
3. Javasoljuk, hogy üljön a WC-re, és az applikátort mélyen helyezze be a hüvelybe. Utána a mutatóujjával nyomja meg 10-szer az applikátor kupakját, hogy a készítmény mélyen eloszoljon a hüvelyben.
4. A felhordót lefelé tartva permetezzen ki kevés készítményt pl. a mosdókagyló felett. Ezután öblítse le a felhordót folyó víz alatt és törölgesse el azt egy tiszta kendővel.
5. Minden további alkalmazás előtt egyszerűen helyezze vissza az applikátort, és nyomja meg a szórófejet, amíg némi készítmény kijön.

A felhordót csak egy kezelési ciklusban lehet használni. A felhordót a hüvelyi terápia befejeztével háztartási hulladékként kell kidobni. A felhordó 8 évesnél fiatalabb betegek kezelésére nem használható. A felhordó kizárólag az octenisept® intravaginális felhordására használható, más testnyílásokhoz (pl. orr, fül, végbél) nem alkalmazható.

Kérjük, vegye figyelembe az octenisept® használati utasítását!

**A termékkel kapcsolatban fellépő súlyos eseteket jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hivatalnak.**